


Sistema de limpieza Hydrafacial™ Syndeo



AL FINAL DE CADA TRATAMIENTO



En el primer paso, asegúrate de que el tapón de limpieza está unido a la pieza de mano

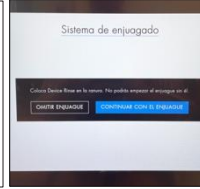

Realiza una limpieza de 20 segundos (20 Second Rinse)



Vacía el Gunkie



Enjuágalo con agua

AL FINAL DE CADA DÍA



En el primer paso, asegúrate de que el tapón de limpieza está unido a la pieza de mano



Realiza una limpieza de 60 segundos (60 Second Rinse)




Limpia los residuos del recipiente con jabón y agua



Déjalo secar al aire

LIMPIEZA DE LA PIEZA DE MANO - SEMANAL

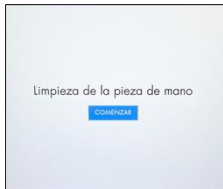

En la pantalla del menú, selecciona Limpieza de la pieza de mano (Handpiece Rinse) dentro de Enjuague del sistema (System Rinses)



Limpia la pieza de mano, los tubos y el cabezal de aluminio con una toallita desinfectante



Desplaza la válvula de control hacia el +



Separa la pieza de mano del tubo girando suavemente el extremo en sentido contrario a las agujas del reloj



Inserta la brocha de limpieza en la entrada dentro del agujero de succión (pequeño) de la parte delantera de la pieza de mano. Empuja por completo la brocha dentro y fuera mientras que giras el aparato tres veces. Haz lo mismo con el conector azul



Retira el cabezal limpiador y sopla dos veces en la parte azul



Vuelve a colocar los tubos



Coloca el tapón de limpieza



Realiza una limpieza de 60 segundos (60 Second Rinse)

Hydrafacial™

Sistema de limpieza Hydrafacial™ Syndeo

LIMPIEZA DEL COLECTOR - SEMANAL



En la pantalla, selecciona Menu. A continuación, selecciona Limpieza del colector (Manifold Rinse) dentro de Enjuague del sistema (System Rinses)

Quita los sérums del colector




Inserta la botella Rinseaway en la ranura 1 del dispositivo. Selecciona Start Rinse



Cuando se haya completado la limpieza, desconecta la botella Rinseaway del dispositivo de la ranura 1 y conéctala a la ranura 2. Selecciona Continue



Cuando se haya completado la limpieza, desconecta la botella Rinseaway del dispositivo de la ranura 2 y conéctala a la ranura 3. Selecciona Continue. Al terminar, cambia la botella a la ranura 4 y selecciona Continue.

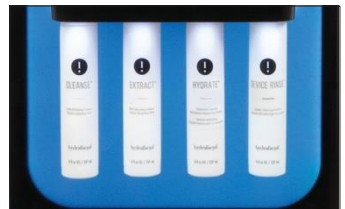

Vuelve a conectar todos los sérums y limpia el recipiente de residuos

LUCES LED



Para limpiar: Frota suavemente con una toalla blanda ligeramente humedecida y, a continuación, seca con otra toalla también suave.

Para desinfectar: Desenchufa el dispositivo de la corriente. Limpia la superficie del dispositivo con una toallita desinfectante aprobada durante al menos 30 segundos. Las toallitas desinfectantes aprobadas son: Toallitas CaviWipes

TERAPIA DE DRENAJE LINFÁTICO



Limpia las piezas de mano del drenaje linfático con un producto germicida en cualquier área que esté en contacto con la piel



SISTEMA DE PANTALLA TÁCTIL



Usa un limpiador para cristales y un trapo o toalla de microfibra para limpiar el sistema de pantalla táctil. Rocía el trapo y no directamente en la pantalla